



Gebrauchsfertige Desinfektionstücher

Sehr gute
Hautverträglichkeit

kodan® wipes

Unser Plus

- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Universell einsetzbar
- Schnelle Abtrocknung auf Flächen
- Gebrauchsfertig
- Sehr breite antimikrobielle Wirksamkeit: bakterizid inkl. Tb, fungizid (C. albicans), begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, sowie Influenza-Viren), Adeno- und Rotavirus
- 90 Tücher/Dose
- kodan® wipes Nachfüllbeutel erhältlich

Anwendungsgebiete

- kodan® wipes eignen sich hervorragend zur universellen Desinfektion, wie z.B.
- zur Reinigung der intakten Haut, wie beispielsweise von Patienten, Pflegepersonal und Besuchern.
 - zur Desinfektion nicht-medizinischer Flächen, wie beispielsweise von Türgriffen, Arbeitsflächen, und Fußböden.
 - zur Desinfektion von Wickelauflagen und im Toilettenbereich.

Anwendungshinweise

- kodan® wipes sind einzeln entnehmbar und sofort einsatzbereit.
- Zu behandelnde Hautareale oder Flächen gleichmäßig und gründlich mit dem Feuchttuch abreiben.
- Auf eine ausreichende Benetzung achten.
- Einwirkzeiten gemäß des Anwendungsgebietes beachten.
- Zur Anwendung auf größeren Flächen ggf. mehrere Tücher verwenden.
- Haltbarkeit: 3 Monate nach Anbruch

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid gemäß VAH	gebrauchsfertig	30 Sek.
levurozid	gebrauchsfertig	15 Min.
fungizid	gebrauchsfertig	15 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) gemäß DVV-/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	30 Sek.
Adenovirus	gebrauchsfertig	2 Min.
Rotavirus	gebrauchsfertig	1 Min.

Anwendungsgebiet	Konzentration	Einwirkzeit
Flächendesinfektion gemäß VAH	gebrauchsfertig	2 Min.
Flächendesinfektion in Krankenhäusern und Arztpraxen gemäß VAH	gebrauchsfertig	5 Min.



Produktdaten

Zusammensetzung:

Eine Dose bzw. ein Nachfüllbeutel enthält 90 gebrauchsfertig getränkte Tücher.

100 g Wirkstofflösung enthalten: 30,0 g Propan-2-ol, 30,0 g Propan-1-ol

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	26 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 5 / 20 °C / (unverdünnt)
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor

Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Augenkontakt vermeiden. Nur zur äußeren Anwendung.

Alkoholempfindliche Flächen (wie z. B. Acrylglas) dürfen nicht behandelt werden.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
kodan wipes -INT- 90 ST DS	10/Karton	140401
kodan wipes refill -INT- 20x90 ST KT	1/Karton	140402
kodan wipes refill -INT- 6x90 ST KT	1/Karton	140403

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wandhalterung für Spenderdose (klein)	134417

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com